

## Комплект для ангиографии

- Простыня для ангиографии с бедренным и лучевым доступом
- Материал с повышенной прочностью и с усилением вокруг операционного поля
- Дополнительное впитывание в зоне хирургического вмешательства
- Абсолютно непроницаемый материал
- Прозрачные боковые вставки
- Асептическое раскрытие за счет особенностей упаковки и укладки комплекта
- Защита комплекта - три уровня упаковки





01 Начните укладку пациента с отверстия для бедренного доступа.  
Следуйте указывающим стрелкам.



02 Укройте ноги пациента, раскрыв простыню.



03 Продолжайте раскладывание простыни по направлению к голове пациента.



04 Раскройте боковые части простыни, удалив защитную бумагу с отверстия для лучевого доступа.



05 Зафиксируйте простыню и продолжайте раскрытие боковой части простыни.



06 По желанию, прикрепите простыню с клейким краем, чтобы укрыть бедренный доступ.

Комплект для ангиографии/Арт. 698260	Размер, см
1 простыня для операционного стола	150 x 140
1 полотенце	19 x 25
1 впитывающая пеленка	56 x 80
1 простыня с клейким краем	50 x 50
1 простыня для ангиографии, с отверстиями 5 x 7 (2), и 7 x 9 (2)	240 x 330
1 простыня для операционного стола	150 x 140

Количество в упаковке: 5 шт. в тов. уп./ 10 шт. в трансп. кор.

