

Mepilex® Lite

PANSEMENT HYDROMOUSSE ABSORBANT ET MINCE

- Minimise les traumatismes et la douleur
- Pour les plaies sèches à exsudatives
- Se conforme parfaitement au relief irrégulier de la peau
- Peut être appliqué sous un bandage compressif
- Peut être coupé sur mesure

Coussin en mousse extra-mince (2 mm)

- Absorbe l'exsudat
- Peut être utilisé sous un bandage compressif
- Confort de port

Couche Safetac®

- Atraumatique lors du retrait
- N'adhère pas à la plaie
- Réduit le risque de macération




Film externe en polyuréthane

- Perméable à l'air et la vapeur
- Imperméable
- Résistant aux bactéries et aux virus (>25nM)


Technologie Safetac®

Safetac® est une technologie unique et brevetée qui minimise la douleur et le traumatisme pour le patient. La technologie Safetac® est disponible exclusivement sur les pansements de Mölnlycke Health Care, notamment les pansements Mepilex Border Post-Op, les pansements Mepilex, Mepitel, Mepiform et Mepitac.

Pour plus d'information, visitez www.safetac.com

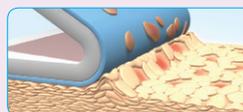


Les adhésifs traditionnels n'adhèrent que sur les crêtes de la peau, et doivent donc être plus fortement adhérents pour rester en place.

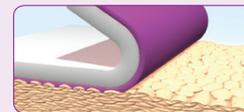

Safetac épouse les reliefs de la peau, scellant ainsi la plaie. En plus, le pansement n'adhère pas au lit de la plaie.


Mode d'emploi

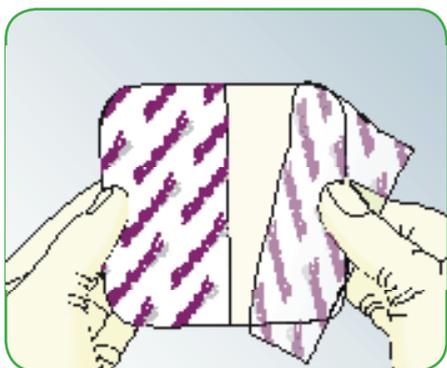

Nettoyez la plaie. Séchez bien le pourtour. Otez d'abord le film protecteur supérieur. Laissez éventuellement le 2e film protecteur en place afin de garantir l'application stérile du pansement.



Veillez à ce que Mepilex® Lite recouvre la peau environnante sur 2 cm au minimum. Commencez par le côté que vous avez débarrassé de son film protecteur et maintenez la 2e partie soulevée. Appliquez la face adhésive sur la plaie. Ne tirez pas sur le pansement. Avant d'appliquer la 2e partie, enlevez le 2e film protecteur (à l'aide de la languette).

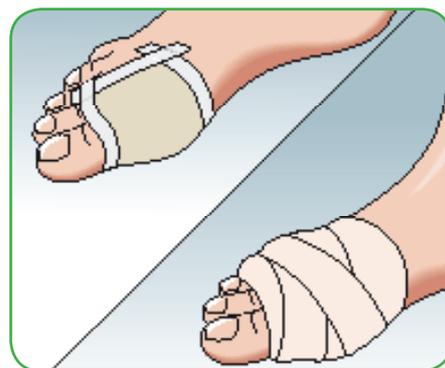

Fixez Mepilex® Lite en utilisant un bandage ou toute autre bande de fixation.

Avantages

- Minimise les traumatismes et la douleur lors du retrait
- Minimise le risque de macération
- Maintient un milieu humide
- Auto-adhésif : application des plus aisées
- Peut être coupé sur mesure
- Mince et confortable
- Adhère parfaitement aux zones difficiles d'accès telles que les pavillons auriculaires
- Peut être soulevé et remis en place
- Peut éventuellement être laissé en place pour les séances de radiothérapie avec l'accord du radiothérapeute
- N'est pas occlusif (pied diabétique)

Indications

- Plaies sèches à exsudatives
- Pied diabétique
- Plaies d'irradiation
- Escarres
- Plaies traumatiques, excoriation 'skin tears'

Mesures de précaution

En cas de signes cliniques d'infection, instaurer un traitement adéquat.



Mepilex Lite assortiment

Réf.	Dim. (cm)	Code CNK	Pcs/RET	Pcs/TRP
284000	6x8,5	2115-236	5	14x5
284100	10x10	2115-251	5	10x5
284300	15x15	2115-277	5	10x5
284500	20x50	3028-677	4	6x4

Plus d'info sur www.molnlycke.com/be-fr

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, Belgique. Tél +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care, Mepilex sont des marques et des logos déposés par la société Mölnlycke Health Care AB.
© 2010 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.


Mölnlycke®