




Mölnlycke®

Mepilex® Border Flex

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Apósito autoadhesivo de espuma
cubierto de suave silicona

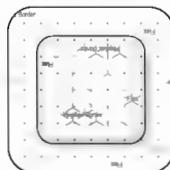

Revised 2019-05

40294-39

PD-557965 rev. 00

Master PD-533177 rev. 04

 Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

STERILE EO



CE 2797



No utilizar si el envase está dañado




Para lesión con poco exudado



Para lesión con exudado moderado



Para lesión con mucho exudado

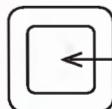


Medida del apósito para cubrir la lesión


MD

Producto sanitario

Mepilex® Border Flex < 14 x 15 cm

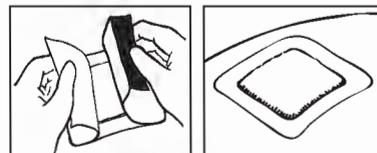

Mepilex® Border Flex ≥ 14 x 15 cm

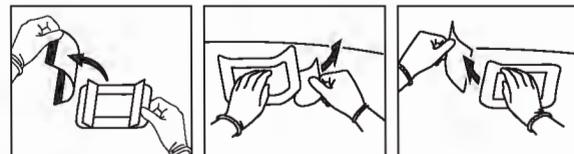

SPAIN

Mölnlycke Health Care S.L.,
Av. De la Vega 15, Edif. 3, 3a Planta
ES-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 484 13 20

Customer Service Tel: 900 963 232

Mepilex® Border Flex

Apósito autoadhesivo de espuma cubierto de suave silicona

Descripción del producto

Mepilex Border Flex es un apósito cómodo, autoadhesivo y absorbente que mantiene un nivel de humedad óptimo en el lecho de la herida. La capa exterior impermeable protege la herida de la suciedad y las bacterias. El apósito cuenta con una capa de silicona Safetac®, tecnología adhesiva exclusiva, de contacto con la herida. Minimiza el dolor de los pacientes y el traumatismo en las heridas y la piel perilesional durante la retirada del apósito.

El apósito Mepilex Border Flex está compuesto por:

- una capa de contacto con la herida formada por un adhesivo cubierto de suave silicona (Safetac) y un film
- un cuerpo de absorción flexible y absorbente con tres capas: una espuma, una capa expansiva de tejido no tejido y una capa de fibras superabsorbentes; el cuerpo de absorción está parcialmente perforado mediante la tecnología Flex
- un film exterior, transpirable pero impermeable, que ofrece una barrera contra los contaminantes externos

Contenido del material del apósito:

silicona, poliuretano, poliacrilato, algodón, viscosa, poliéster y poliolefina.

Indicaciones de uso

Mepilex Border Flex puede utilizarse en úlceras por presión y úlceras varicosas.

Precauciones

- No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad diagnosticada a los apósitos o sus componentes.
- No utilice este apósito junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Si observa signos de infección, como fiebre, enrojecimiento, calentamiento o hinchazón de la herida o la piel perilesional, consulte a un profesional sanitario para que le indique un tratamiento adecuado.
- No reutilice el apósito. En caso de reutilización, puede empeorar el rendimiento del producto y pueden producirse casos de contaminación cruzada.
- Estéril. No lo utilice si la barrera estéril está dañada o abierta antes de su uso. No lo esterilice de nuevo.

Instrucciones de uso

Mepilex Border Flex puede ser utilizado por cualquier persona bajo la supervisión de profesionales sanitarios

1. Lave la herida según la práctica clínica.
2. Seque bien la piel perilesional.
3. Seleccione un tamaño / una forma de apósito adecuado/a. Cuando proceda, elija una forma de apósito adecuada para la cavidad anatómica específica. El cuerpo de absorción deberá cubrir al menos 1-2 cm del borde de la piel perilesional seca para proteger la piel perilesional de la maceración y fijar el apósito de forma segura.
4. Retire el film protector y coloque el lado adhesivo sobre la herida.
5. Retire el resto de papeles protectores y alise el borde sobre la piel. No estire el producto.

Puede dejar el apósito Mepilex Border Flex sobre la herida hasta un máximo de 7 días, en función del estado de la herida y de la piel perilesional, o según las indicaciones del médico.

El apósito Mepilex Border Flex puede utilizarse bajo vendajes de compresión.

Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales.

Otra información

El color de la espuma de poliuretano empleada en el producto puede volverse más amarillo si se expone a la luz, al aire y/o al calor. Este cambio de color no repercutirá en las propiedades del producto mientras se utilice antes de la fecha de caducidad.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el uso de Mepilex Border Flex debe ser notificado a Mölnlycke Health Care.